

アズテック使用方法 その2

担架の横吊りから縦吊り

担架、リッタースパイダー、アズテックの組合にせにより担架を横から縦、縦から横吊りへの移行が可能になります

リッタースパイダーをパーセル巻きで担架4隅にセットしておく事で担架バランスの微調節が容易になります。足部側にアズテックを決着します。

アズテックバックは担架にセットしておくことでロープの収納が容易になります。

- ①アズテックエッジレストレイントを上部から下部に引ける様にして、ラチェットを上部側にセットします。
- ②要救助者付近まで降下すればアズテックを緩め（延ばし）担架を縦にします。



- ③要救助者を担架に添わせませす

- ④AZTEK エッジレストレイントを引き担架を水平します。

